



有限会社 イーコスモス E-COSMOS Corporation

より良い社会へ創意・工夫・実行 Idea and Challenge for Global Good

◎◎スマートムーバー（品番MS-040A）取扱説明書◎◎

素材：ポリプロピレン（спанボンド不織布）

ご利用可能体重：120kgまでの方にご利用頂けます。

製品の上下の見分け方（使用方向の確認方法）：タグがついている部分が上半身外側となりますのでご使用前にご確認下さい。

ご使用前の点検：ご使用前に強度の点検を欠かさず行ってください。実際のご使用に当たっては不織布本体の破損、縫糸のほつれ、切り裂き傷、高熱による劣化、油性分、酸アルカリ等による劣化、紫外線や経時変化による強度不足等がないかどうか検査の上ご使用ください。当社は使用条件がお客様により異なるため、使用可能期間の保証は行っておりません。使い捨てのご使用をお薦めします。

保管方法：ポリプロピレンの性質上、紫外線による強度劣化（一般的に500～1000時間の照射で強度は半減します）が避けられませんので袋などに入れ紫外線の当たらない場所に常温で保管して下さい。お子様の手の届かないところに保管下さい。

作業（搬送）者の人数：ご利用に当たっては無理をなさらず、3名様以上での搬送作業をお薦めします。力不足の方や少人数による無理なご利用は絶対に避けて下さい。作業者の腰痛等作業に伴う障害のもととなります。また、搬送時の不測の事故の原因になったりします。特に階段の上がり下がりにご利用の際には作業者の人数に余裕を持たせる等、十分ご注意ください。利便性と危険性とは時としてコインの表裏の関係にあります。

その他使用上のご注意：・首回りが不自由な方、手足や腰部に骨折等の損傷や傷病のある方のご搬送は、まず医師・専門家に相談の上ご使用ください。（災害、救援、遭難回避等の目的で）業務上使用された場合は感染防止のため再使用せず、製品は焼却処分して下さい。

提携先のユーエスパシフィック東莞工場（中国）は以下信頼のマークの認証を受けています。



販売元：有限会社イーコスモス

〒663-8113 西宮市甲子園口1丁目14-12-404 電話0798-67-9510 ファックス0798-67-9520