

正しい姿勢をキープして  
つらい腰を  
しっかりサポート！

# BACKCARE®

男女兼用

バックケア背中サポートベルト



ハードな作業、  
スポーツ、  
日常生活の動作を  
しっかりサポート！

背中のカーブに  
ぴったりフィットする  
特殊パッドで正しい  
姿勢をキープ！


強化マジックテープで  
簡単に装着、自由に  
強弱調整が可能！

販売価格

6,980 円


(消費税・送料込)

## 特殊パッドでしっかりサポート

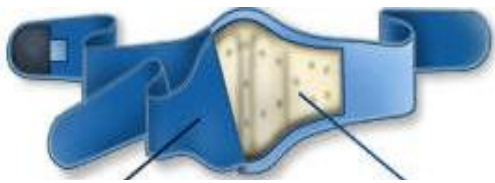


ベルト：  
作業性を損なわず、腰  
背部に程よい  
プレッシャーを  
与えるデザイン

内部の特殊パッド：  
あらゆる体型に  
フィットする  
機能的なデザイン

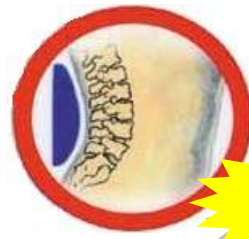

バック  
ケア

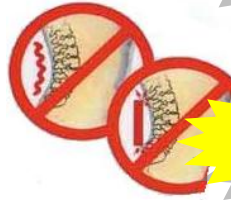

NO  
GOOD

バックケア背中サポートベルトは、身体にぴったりフィットする特殊パッドがしっかり支え、正しい姿勢を保ち、長時間の作業、ハードな動作による腰への負担をやわらげます。身体にフィットしていないサポート方法では、効果がないばかりでなく、筋肉の収縮など身体に負担を与える場合があります。

## ご使用方法：

- ベルトを開いてマークの入った面を外側にして着けます。
- ベルトを腰に巻き、パッドの突起部が背中中央に来るように位置を決めます。
- 左側のベルトを右側のベルトの上に重ね、マジックテープで止めます。
- ベルト紐を左側のベルトループに通しベルト紐を締め、右側をマジックテープで固定します。

## ご使用上の注意：

- 本品は医療用ではありません。
- 使用感・痛みやのよらぎには個人差がありますのでご了承ください。
- 本品は正しく装着してご使用ください。
- きつく締めすぎないでください。
- 肌着、衣類の上から装着してください。
- 就寝時のご使用はお避け下さい。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 使用中、使用後に痛み、かぶれ、かゆみ等の異常や違和感が生じた場合は、すぐに使用を中止し、専門医の指示に従ってください。
- 本品を折り曲げたり、もみ洗いしないでください。破損の原因になります。
- お子様の手が届かないところに保管してください。
- 妊婦の方、通院されている方は医師にご相談の上ご使用ください。
- 運転中にベルト装着が気になる方は車の運転時のご使用はお避けください。

## 材質：

- 表面：100% ポリエステル
- 内側：100% ポリエステル PU スポンジラミネート加工

## 洗濯表示：



- タンブラー乾燥はお避けください。
- 直射日光を避け必ず陰干しをしてください。
- 色落ちすることがありますのでお洗濯の際には他のものと分けて洗ってください。

## 適応サイズ(約)/cm

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
XS	58~71cm	L	88~101cm
S	68~81cm	XL	98~111cm
M	78~91cm	XXL	108~121cm
商品サイズ*			
カラー	ブラック		

※ 計測値が重なる場合は、大きい目のサイズをお選びください。

- U.S.A. Patent Number (米国特許番号):  
5,429,587 & 5,651,763
- European Patent Number (欧州特許番号) :1452155
- 中華人民共和国国家知識産権局(中国特許)  
申請番号:03106669.0
- 日本特許出願中:申請番号 2004-055292



- ご使用前に必ずこの説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
- この説明書は大切に保管し必要な時にお読みください。



株式会社ユー・エス・パシフィック

〒663-8113

西宮市甲子園口1丁目14-12-404

tel 0798-67-9510

fax 0798-67-9520

http://www.us-pacific.co.jp

中国製